

歩行補助車 friendlyα

フレンドアルファシリーズ
WF-1a・WFP-1a・WF-2a・WFP-2a

フレンドアルファシリーズは、右手側に杖ストッパーを搭載した歩行補助車です。
基本操作に就いては「フレンドシリーズ」取扱説明書をご覧ください。

警告

- ・杖ストッパー部分をつかんだまま体重を掛けないでください。
- ・杖ストッパー高さ調節ピンを本体フレームから引き抜いた状態での利用はおやめください。
- ・杖ストッパーを杖のセット以外での使用はおやめください。
- ・杖ストッパーの形状に合わない杖の場合は、杖ストッパーの利用をお控えください。
- ・杖ストッパー高さ調節ピンを科学薬品等で洗浄するのはおやめください。

注意


- ・杖ストッパー部分を壁等に接触しない様ご注意ください。
- ・杖ストッパー部分に物が引っ掛からない様ご注意ください。
- ・杖ストッパー部分が破損している場合は杖のセットをお控えください。
- ・フレンドアルファシリーズ専用杖ストッパーは右手側専用の部品です。ご注意ください。

【フレンドアルファシリーズ専用杖ストッパー高さ調節ピン】

「杖ストッパー」



「高さ調節ピン」

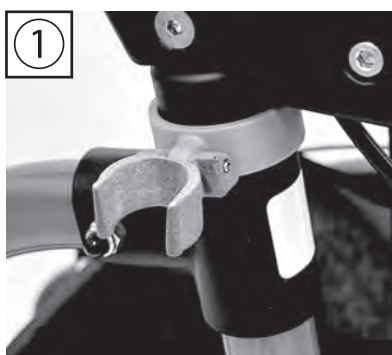

- ①杖ストッパー高さ調節ピンは写真の様に本体にセットしてください。
- ②写真の様に杖をセットしてください。直径 19 mm～22 mmの杖にご利用出来ます。
- ③杖ストッパーを使用しない場合は写真の様に上側に折りたたんでください。

※フレンドシリーズ本体の前腕支持台の高さを調節する場合は、杖ストッパー高さ調節ピンを真横に引き抜いてください。

※杖ストッパーと杖が一緒に外れる恐れがあります。杖ストッパーから杖を取り外す際は、高さ調節ピンを押さえて杖を取り外してください。

